



DZ Bewegungsmelder

Zur Sturzprävention für optimale Bewohnersicherheit



Altersbedingte Krankheiten der Heimbewohner erfordern von den Betreuungspersonen eine höhere Präsenz in den Zimmern. Es besteht der Wunsch, dass das Verlassen des Bettes oder sonst eines Bereiches unmittelbar angezeigt wird, um mögliche Stürze möglichst zu vermeiden.

Mit dem kabellosen DZ Bewegungsmelder von TeleAlarm kann dieser Wunsch vollumfänglich erfüllt werden. Gefährliche Situationen wie sie beim Übersteigen von Trittmatten vorkommen, können so gar nicht entstehen. Ausserdem wird die äusserst einfache Handhabung geschätzt!

Das Gerät funktioniert zusammen mit einer NurseCall Schwesternrufanlage oder einem Lokalempfänger LE10, welcher an ein verdrahtetes Rufsystem (mittels potentialfreiem Kontakt) angeschlossen wird.

- ▶ Meldet das Aufstehen des Bewohners unverzüglich an die Pflegekraft
- ▶ Übersteigen des Sensors ist nicht möglich (wie bei der Trittmatte)
- ▶ Weniger Kontrollgänge durch das Personals nötig
- ▶ Äusserst einfache Handhabung
- ▶ Keine Kabel in der Nähe des Bewohners
- ▶ Geringer Platzbedarf
- ▶ Einsetzbar mit dem TeleAlarm NurseCall System
- ▶ Einsetzbar in verdrahteten Anlagen zusammen mit dem TeleAlarm LE10-Funkempfänger

Funktionsbeschreibung

Der DZ Bewegungsmelder wird am Boden aufgestellt und Richtung Bett ausgerichtet. Der genaue Erfassungsbereich kann durch leichtes Drehen des Gerätes eingestellt werden. Die Detektion einer Bewegung wird mittels einer grossen Leuchtdiode angezeigt und durch ein Funksignal an das Rufsystem weitergeleitet.

Während der Anwesenheit einer Betreuungsperson kann die Überwachung ausgeschaltet werden.

Gerätevarianten

Variante für LE10 und NurseCall:



DZ Bewegungsmelder mit RAC

Variante für NurseCall:



DZ Bewegungsmelder mit N46

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	190 x 105 x 105 mm
Gewicht	LE10-Variante: 250g N46-Variante: 400g
Verzögerungszeit zwischen Detektion und Rufübertragung	1, 3, 5 oder 10 Sekunden
Spannungsversorgung	3.6 V Lithium Batterie 2/3 AA Marke Saft
Zulässiger Temperaturbereich	0 °C bis 55 °C
Artikelnummer	T.240.001.295 (ohne Funkmodul)
Artikelnummer kompatible Funkmodule	RAC: F.01U.140.059 N46: F.01U.140.037
Zusammenbau Funkmodul mit DZ Bewegungsmelder	Auf Anfrage in der Schweiz erhältlich



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

■ Deutschland

info-de@telealarm.com
+49 (0) 341 271 57 80

■ Österreich

info-de@telealarm.com
+41 (0) 32 911 11 13

■ Schweiz

info-ch@telealarm.com
+41 (0) 52 355 13 00



Adresse

TeleAlarm Europe GmbH
Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

© TeleAlarm 2019
daza_FL_DE_V1.2.2019.01